

電話での使い方・SX-007

通常の会話の時、みみ太郎のボリュームが 5 以下の方でしたら電話でも使用可能と言われております。(個人差はありますが)


みみ太郎 本体の「SMD」マークの左右に人工耳介一対が入っております。そこが耳と考えてください。

みみ太郎を装着したまま、本体集音部に 電話の受話器 (受聴部分) をあててください。

その状態で 電話を聴いてみてください。

通常より みみ太郎のボリュームを2 メモリ位上げた方が聞き取りやすいです。

電話を使う場合

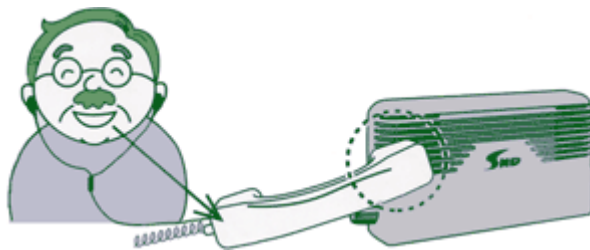

電話を利用する場合は上図の様にお使いください。

通常の補聴器では考えられないほど明瞭に聞き取る事ができます。

携帯電話、PHS には使えません。

普通電話のワイヤレス子機には使えません。

親機であっても回線とワイヤレス接続の物は使えません。

電話での使い方・SX-008

イヤホンコード途中のマイク部分が耳とお考えください。

みみ太郎を装着したまま、電話の受話器（受聴部分）を

マイクにあてて一緒に握ってください。

マイク部分が耳の代わりになりますのでそのまま電話を

聴いてみてください。

携帯電話、PHS には使えません。

普通電話のワイレス子機には使えません。

親機であっても回線とワイレス接続の物は使えません。

大きなボリューム設定でなければ相手の声が聞き取れない場合
（あまり大きなボリューム設定ですと、ハウリング（ピー音）が
おきやすくなりますので、お電話での使用はおやめください。

